



PROTETIM®

SOL

FÉMSZÓRT

REVÍZIÓS CSÍP PROTÉZIS SZÁR

Euro kúp

ÚJ!

CE
0197



SOL

CE
0197

fémcsőröt revíziós csíp protézis szár

A protézis **EURO** kúppal rendelkezik a moduláris protézis fejek fogadására: Ø26, Ø28 és Ø32 mm-es fémszárak, cervicocapitalis (CKP) fejek, bipoláris CKP fejek.

A protézis proximális része a hagyományos protézis alakra emlékeztet en ovális alakkal indul és lefelé keskenyedve a törzse kör keresztmetszet vé és enyhén kúposává válik.

A protézis szár alsó része éles, hosszanti hornyokkal van ellátva. Keresztmetszete ett l a Nap stílizált ábrázolásához hasonlít, mely l a protézis a nevét kapta. Az éles hornyok a lefelé kónuszosan keskenyed szárat beveréskor rotációstabilan rögzítik a combcsont középs harmadában, így kiegészít rotációstabilizáló megoldások (pl. reteszelt csavarok) nem szükségesek.




A szár mediális élén hosszanti bevágás, ún. "vércsatorna" húzódik végig. Beültetéskor ez biztosítja, hogy a vel rt a protézis teljesen ne zárja le, így nem alakulhat ki benne túlnyomás és következményes zsírembólia. A szár legalsó szakaszán lapszerű elhelyezkedés hasítékot alakítottunk ki, melynek szerepe a normális, el refelé domborúan görbül combcsont alakjához való rugalmas adaptálódás. A szárat 6 méretben gyártjuk, méretenként 1 cm-rel növekv hosszúságban (23 cm-t l 28 cm-ig) és 2 mm-enként növekv átmér vel (12 mm-t l 22 mm-ig).

Speciális igény esetén a méretválaszték b vithet .

Anyagmin sége: TiAl6V4 (ISO 5832-3).

A fémszórás anyaga: Titán (ISO 5832-2).

A makroporozus réteg vastagsága 500-750 mikron.

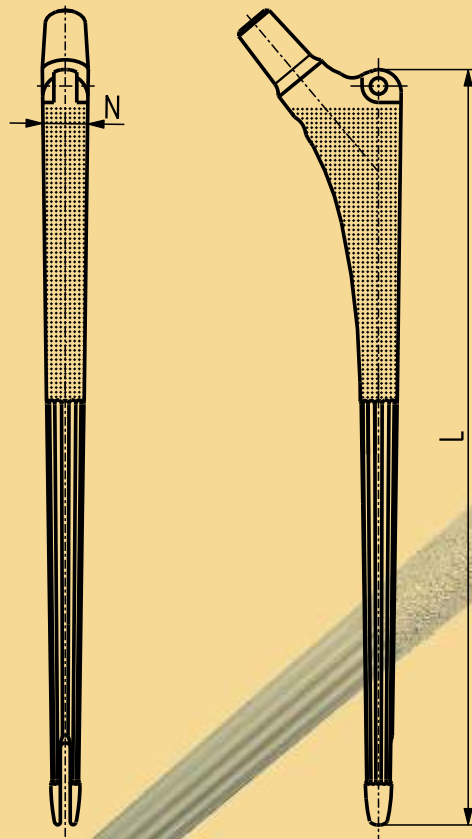

Anyag:
TiAl6V4 (ISO 5832-3)
A fémszórás anyaga:
Titán (ISO 5832-2)

Kat. szám	Méretjel	L (mm)	N (mm)
SO-1230	SOL1	230	14
SO-2240	SOL2	240	16
SO-3250	SOL3	250	18
SO-4260	SOL4	260	20
SO-5270	SOL5	270	22
SO-6280	SOL6	280	24